

Schritt 1

Applikator aufrecht halten, sodass die Sprühdüse nach oben zeigt. Rote Kappe auf den blauen Adapterstücken entfernen.



Schritt 2

Glasampulle auf die blauen Adapterstücke schieben. Ampulle mit grüner Kappe: grüne Spritze, Ampulle mit silberner Kappe: weiße Spritze.



Schritt 3

Glasampulle aufrecht halten. Kolben drücken, damit die Flüssigkeit in die Spritze gelangt. Vorsichtig schütteln, bis sich das Pulver aufgelöst hat.




Schritt 4

Den Kolben loslassen. Dieser bewegt sich zurück. Ein zweites Mal drücken, sodass sich beide Lösungen homogen mischen.



Schritt 5

Den Ein-/Aus-Schalter auf der Unterseite des Geräts drücken, um das System vor dem Auftragen des Hydrogel-Sprays zu „aktivieren“.

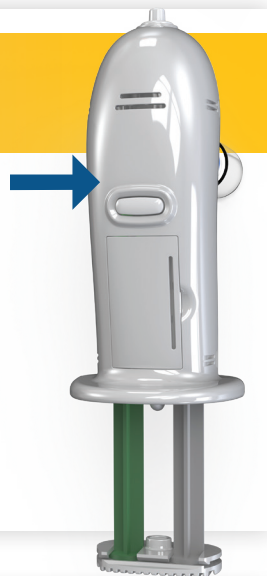


Schritt 6

Das Gerät vor der Behandlung so ausrichten, dass die Ampullen nach oben zeigen. Entfernung der Adapterstücke durch Drehen der blauen Stücke gegen den Uhrzeigersinn, bis sich diese ablösen und entsorgt werden können.



Schritt 7

Applikator aufrecht halten, Sprühdüse zeigt nach oben. Ein Stück Gaze 5-10 cm vor die Düse halten. Festen Druck bis zur Mitte des Kolbens ausüben, bis das Produkt aus der Düse spritzt. Sobald sich grünes Dichtmittel auf der Gaze bildet, den Kolben nicht weiter nach unten drücken.

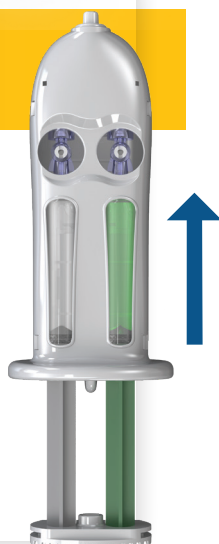

Schritt 8

Das Gerät auf die Behandlungsstelle richten und etwa 2 bis 4 cm entfernt halten. Den Kolben mit angemessener Kraft und in der Mitte gedrückt halten, um die gemischte Lösung zu verteilen.



Craniomaxillofacial

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte. Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss die medizinische Fachkraft stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Adherus, Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer. Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union. Adherus und Adherus ET sind die einzigen von der FDA zugelassenen Hydrogel-Duraversiegelungen mit patentiertem AutoSpray-Applikator mit integrierter Luftpumpe.

